

i-INSERT

Einsetzhilfe für
Sklerallinsen



appenzeller
kontaktlinsen[®]
passt.

Gebrauchsanweisung
der Einsetzhilfe i-INSERT
für Sklerallinsen

→ Hände waschen

Waschen Sie ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife. Verwenden sie keine rückfetten- den Seifen.

→ i-INSERT reinigen

Reinigen Sie den i-INSERT mit Wasser, sollte er staubig geworden sein. Stellen Sie den i-INSERT auf einen Tisch, sodass sie ihn mit dem Auge bequem erreichen können.

→ Linse reinigen und auflegen

Reinigen Sie ihre Sklerallinsen gemäss den Anweisungen des Herstellers oder ihres Kontakt-

linsen-Spezialisten. Legen Sie ihre Sklerallinse mittig mit der Rückseite nach oben auf die Halterung des i-INSERT. Befüllen sie Ihre Sklerallinse mit geeigneter Kochsalzlösung

→ Auge sanft auf Linse drücken

Ziehen Sie ihre Augenlider mit den Fingern auseinander und positionieren sie ihr offenes Auge über dem i-INSERT. Das eingebaute Licht hilft ihnen die richtige Position zu finden. Drücken Sie ihr Auge sanft in die Sklerallinse hinein, bis sie von allein in ihrem Auge haften bleibt.

→ Wichtiger Hinweis

Dieser Prozess kann ein gewisses Mass an Übung und Überwindung erfordern. Sollte es nicht direkt funktionieren, befüllen Sie ihre Kontaktlinse erneut und versuchen Sie es weiter. Ihr Kontaktlinsen-Experte unterstützt sie gerne bei Problemen während des Anlegens ihrer Sklerallinsen.

